

# AiMY

# NECK

# MASSAGER

エイミー ネックマッサージャー

AIM-023

取扱説明書 添付文書 保証書付



# AiMY NECK MASSAGER

エイミー ネックマッサージャー AIM-023

安全にお使いいただくために	02
低周波治療とは	05
各部の名称とはたらき	06
ご使用前に	07
使いかた	08
お手入れについて	11
保管のしかた	12
本製品を破棄するとき	12
仕様	13
故障かな？と思ったら	14
使用目的/効能または効果	15
保証とアフターサービス	1
保証書	裏表紙

このたびは、エイミー ネックマッサージャーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



## 安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

### 警告/注意表示について



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害\*の発生が想定される危害・損害の程度。  
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 安全記号について

この取り扱い説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

## 使用者の体調に関する注意

### 警告



必ず守る

医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する

- ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内埋込型医用電気機器を使用している人
- ・心臓・脳神経に障害のある人
- ・妊娠中の人、または出産直後の人
- ・体温38°C以上(有熱期)の人  
【例:急性発症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき】
- ・感染症疾患の人
- ・皮膚知覚障害、または皮膚に異常がある人
- ・せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなど急性[疼(とう)痛性]疾患の人
- ・ひざ周囲にはれ、熱感、発赤など急性炎症状のある人(変形性膝関節症の炎症期、関節リウマチの炎症期を含む)
- ・化膿性膝関節炎、骨折または半月板単独損傷の診断を受けている人
- ・安静を必要とする人
- ・薬を服用している人
- ・血圧に異常のある人
- ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・血行障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・低温やけどをしたことのある人
- ・体内に金属が埋め込まれている人
- ・人工股関節置換術を含む、ひざに手術の既往歴がある人
- ・上記以外で身体に特に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。機器を使用する場合、適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人は、医師と相談する。



禁止

心臓の近く、胸部付近、頭部、口や陰部、皮膚疾患部、刺青(タトゥ)などには使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

自分で意思表示ができない人、または自分で操作ができない人に使わせない

事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

使用中に体に異常があらわれたり感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師又は専門家に相談する

そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

幼児や子供に使用させたり、本体の上で、遊ばせない

けがや故障のおそれがあります。



禁止

全てのコードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続する。

火災や感電の原因となります。



禁止

治療以外の目的で使用しない

事故やトラブル、故障の原因になります。



禁止

ゲルパットの表面が欠けたり、崩れている状態で使用しない

事故やトラブル、故障の原因となります。



禁止

他の治療器と同時に使用しない

事故やけが、体調不良を起こすおそれがあります。



禁止

湿布や塗布式またはスプレー式鎮痛消炎剤との併用はしない

体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

初めて使用する人や使いなれるまでは必ずつよさを「小さい数値」で使用する  
また治療中に痛みなどを感じたら直ちに使用をやめる

事故や体調不良の原因になります。

## 警告



本体パッドやジェルパットに装飾品やクリップなど金属が触れた状態で使用しない  
事故やけがの原因となります。



分解禁止

分解・改造・修理をしない  
火災・感電・けがをすることがあります。



禁止

本製品は1人用なので、  
複数人で使用しない  
火災や感電の原因となります。



禁止

全てのコードは容易に離脱しないよう、  
正しく確実に接続する。  
火災や感電の原因となります。



禁止

導子を正しく装着する。  
火災・感電・けがをすることがあります。

## 注意



必ず守る

本製品の使用によって強い刺激や肌に  
湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師  
に相談すること  
事故や体調不良の原因になります。



必ず守る

1回15分、1日2回を目安に連続使用  
は避け、30分以上あけてから使用する  
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、  
事故やけがまたは体調不良をおこす  
おそれがあります。



必ず守る

感電保護クラスII (回マークを記載)の  
定格出力DC5.0V/1AのACアダプター  
以外は使用しないでください。



必ず守る

本製品が動かなくなったり、異常がある  
場合は、直ちに使用を中止し、電源を  
切って、勝手に修理などせず、お買い上  
げ販売店などに修理を依頼する  
漏電やショートなどによる感電や火災の原因  
になります。



必ず守る

使用する前に必ず取扱説明書に従って  
操作をして、各種ボタン、タイマーなどが  
正常にかつ安全に作動するか確認する  
感電や事故、故障の原因になります。



必ず守る

本体とジェルパッドのケーブルが正しく  
確実に接続されている事を確認する  
感電や事故、故障の原因となります。



必ず守る

ジェルパットの取り扱いについて、下記の  
事に注意すること

- ・ジェルパットを2枚重ねた状態で使用しない。
- ・長時間ジェルパッドを肌に貼り付けたままにしない。
- ・ジェルパッドを他の人と共用で使用しない。
- ・ジェルパッドの粘着面をそのまま放置したり、  
汚れが付いたものと一緒に保管しない。
- ・お手入れしてもジェルパッドの粘着力が戻ら  
ない場合は、新しい専用ジェルパッドと交換  
する。



濡れ手  
禁止

ぬれた手でUSBコネクタを抜き差し  
しない

感電のおそれがあります。



必ず守る

充電時、専用USBケーブルを根元まで  
確実に差し込むこと

差し込みが緩いと、発火や感電の原因に  
なります。



必ず守る

充電時中に停電、地震になった場合は、  
直ちにUSBケーブルを抜く

停電復帰時に事故やけがのおそれがあり  
ます。



必ず守る

USBケーブルのホコリなどは定期的に  
とる

ホコリなどがたまるとう湿気などで絶縁不  
良になり、火災の原因になります。定期  
的に電源プラグをコンセントから抜き、  
乾いた布で拭いてください。



禁止

USBケーブル差込口に金属類などを  
差し込まない

漏電やショートなどによる感電や火災の  
原因になります。



禁止

室温30°C以上の場所や、直射日光の当  
たるところでの使用・保管はしない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、  
故障の原因になります。また変形や変質な  
ど本体の外装を傷めるおそれがあります。



必ず守る

お手入れの際は、本体の電源を必ず切り、  
本体を首から取り外す


守らないと、感電やけがのおそれがあります。





禁止


自動車・バイク・自転車などの運転や、  
機械の操作をしながら使用しない


事故やトラブルの原因になります。


 熱や痛みに敏感でない人は温熱機能を使用しない  
低温やけどのおそれがあります。


 睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しない  
けがや低温やけどをおこすおそれがあります。


 制汗・虫よけスプレー、日焼け止めなどが付着している場合は使用しない  
ゲルパッドの粘着力が低下することがあります。


 本製品に水や他の液体をかけた、浸したりしない  
感電や故障の原因になります。


 **USBケーブルの取り扱いについて、下記のことにご注意すること**

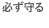
-  必ず守る
- ・ USB ケーブルを取り外すときはケーブルを持たずに、必ずコネクタ部分を持って引き抜く。
  - ・ 傷つけたり破損させない。また加工しない。
  - ・ 無理に曲げたり、引っ張らない。またねじらない。
  - ・ 束ねたまま使用したり、本体に巻き付けない。重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
  - ・ USB ケーブル差込口や、AC アダプターへの USB コネクタの差し込みがゆるいときは使用しない。
  - ・ ねじれをほどこいて保管する。
- 火災や感電の原因になります。


 **しばらく使用しなかったときは、本製品が正常かつ安全に作動することを確認してから使用する**  
確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。


 本体パッド、ゲルパッドを無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。  
けがや故障の原因になります。


 操作ボタンを2つ以上同時に押さない  
故障の原因になります。

 本体に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない  
火災・感電・故障の原因になります。また誤操作の原因になります。

 可燃物やストーブなど火気の近くで使用しない。またこたつの中で使用しない  
内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。

 **3か月に1度は充電する**  
完全放電すると充電できなくなる場合があります。

 お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない  
感電・故障のおそれがあります。

 ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などで拭いたり、殺虫剤などをかけない  
変形・変色・変質のおそれや、ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。

## 低周波治療とは

### ■生理作用をうまく利用する治療方法

自分自身は気づきませんが、脳や心臓、筋肉や神経など、私たちの体はいかなるところからもごく弱い電気を発生しています。これを「生体電気」といい、体が正常に機能していくうえで欠かせない役目を果たしています。私たちの体は、外部から加えられた電氣的な刺激にも敏感に反応し、さまざまな変化を起こす性質があります。人間の体がもともと持っているこのような作用を上手に利用して、生体電気の異常（すなわち体の異常）となってあらわれるこりや痛みなどの治療を行おうとすることが「電気治療」です。低周波治療は、電気治療の代表的な治療法の一つです。

### ■痛みをやわらげる

痛みを感じにくくする領域に低周波電流を流すと、痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えるため、痛みをやわらげると言われています。

### ■治療時間の目安

低周波治療をするときは、弱い刺激から始め、ご自身の心地よい程度の刺激で使用してください。治療時間は30分以内の治療を目安にすることをお勧めします。長い治療時間や強い刺激は筋肉疲労をまねき、逆効果になります。個人差はありますが、長時間での使用や強い刺激での使用は避けてください。

# 各部の名称とはたらき

## ● 本体

### 左側

#### + ボタン(短押し)

[+] ボタンを短く押すと強さが1段階ずつ上がります。

#### + ボタン(長押し)

[+] ボタンを長く押すと本体パッドの強さを調整できます。

#### MODE ボタン

[MODE] ボタンを押すとモードが切り替わります。

#### - ボタン(短押し)

[-] ボタンを短く押すと強さが1段階ずつ下がります。

#### - ボタン(長押し)

[-] ボタンを短く押すとジェルパッドの強さを調整できます。

ジェルパッド接続口

USB 接続口

### 右側

#### 充電ランプ

(充電中)  
白色ランプ点滅  
(充電完了)  
白色ランプ点灯

#### ヒーターボタン

#### ⏻ ボタン(短押し)


[⏻] ボタンを短く押すと音声切り替わります。  
日本語→英語→音声無し  
→日本語

#### ⏻ ボタン(長押し)

[⏻] ボタンを長く押すと電源のON-OFFが切り替わります。

## ● リモコン

+ ボタン  
押すと強さが1段階ずつ上がります。

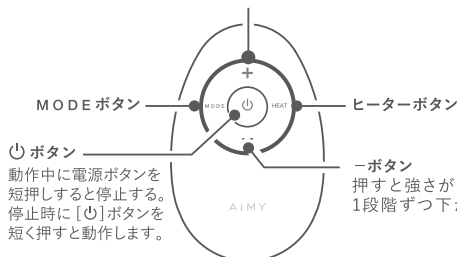

⏻ ボタン  
動作中に電源ボタンを短押しすると停止する。停止時に[⏻]ボタンを短く押すと動作します。

- ボタン  
押すと強さが1段階ずつ下がります。

※リモコンで操作できるのは動作中のみです。


電源オフ後2分以内であれば可能です。

※リモコンの[⏻]ボタンで音声切替はできません。

※リモコンの+ ボタンを長押しでも本体パッドの切替は出来ません。

※リモコンの- ボタンを長押しでもジェルパッドの切替は出来ません。

## ● 専用ジェルパッド (左右 各1枚)

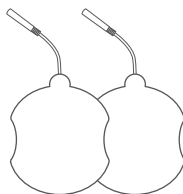


## ● ジェルパッド接続ケーブル



※リモコンと本体の距離が3m 以上の時リモコン操作できない場合があります。

## ● 専用USBケーブル (USBタイプA-マイクロUSBタイプC)

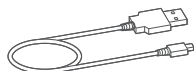

使用後は、ジェルパッドに専用保護シートを貼り付ける

ジェルパッドは取り外さずに、専用保護シートを貼り付けます。生地や手が貼りつかないように注意してください。




## ご使用前に

### 充電をする

- ・ 充電をしながらの使用はできません。
- ・ 使用しなくても3ヶ月に1回は充電をしてください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。

#### ① 付属の専用USBケーブルを本体と接続する


- ・ 本体右側の充電口カバーを開き、付属の充電用USBコードを本体に接続する。

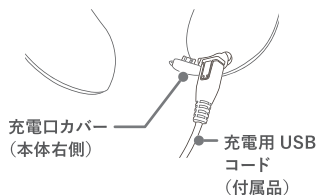

#### ■ ACアダプターで充電する場合

市販品の AC アダプターを使用してください。

- ※ 感電保護クラスII (回マークを記載) の定格出力 DC5.0V/1A の AC アダプターをご使用ください。急速充電用の AC アダプターは使用しないでください。
- ※ 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。

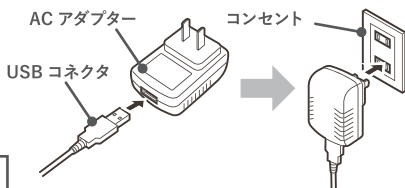

モバイルバッテリーや汎用 PC から本体へ電圧・電流を充電しないでください。故障の原因になります。



充電する時は、DC5V/1A だけを供給してください。故障の原因になります。

市販品の AC アダプターは、電気用品安全法 (PSEマーク) を認証取得している AC アダプター以外は、使用しないでください。故障の原因になります。



#### ② 充電が終わったら USB コネクタを充電器から取り外す

充電ランプが点滅から点灯に変わり、充電が終了したことをお知らせします。

#### ③ 本体から専用 USB ケーブルを抜きます

本体と USB ケーブルの先端をもって、ゆっくり抜いてください。



## 使いかた



### ①首に(直接肌に)装着する。

- 電気刺激が伝わるように首まわりを、水またはぬるま湯で十分に湿らせてから本体を装着してください。温熱モードのみご使用の場合は、湿らせる必要はありません。
- 電気を均等に通電させるため、「本体パッド」が皮膚にぴったりとフィットするように装着してください。
- 髪の毛が長い方は、巻き込まれないように束ねるなどしてください。


※首に(直接肌に)装着しないと電源オン後に[+]ボタンを操作できません。

※首に(直接肌に)装着しないと電源が自動的にオフになります。

※首に(直接肌に)装着しないと約2分に電源が自動的にオフになります。

※2台以上を同時に使用する場合は本体の操作ボタンで操作して下さい。

(リモコンで操作するともう1台も同時操作する時があります。)

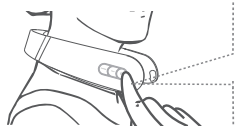

電源・音声切替ボタン(長押し)



### ②右側の[⏻]ボタンを長押しして、電源をオンにする。

デフォルト設定で動作を開始します。変更する場合は手順④以降にしたがって好みの設定に変更してください。

モード	モード1
レベル強さ	レベル1
ヒーターモード	ヒーター1(低温)

※出力がある場合に[⏻]ボタンのLEDがゆっくり点滅します。


出力がない場合は[⏻]ボタンのLEDが点灯します。

※電源をオンにして15分経つと、自動的に電源がオフになります。

途中で使用を止める場合は、[⏻]ボタンを約1秒間長押しして、電源をオフにしてください。

### ③左側の[MODE]ボタンでコースを設定する。

[MODE] ボタンは押すごとにコースが変わり5種類から選択が可能です。停止するには、[-] ボタンを押してレベル0にします。  
※レベル1以上で使用中はモードを切り替えるたびにレベル1にリセットされます。

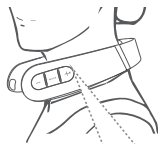

#### モードの特徴

モード1 たたき、さすり、たたきさすり、たたきもみ…  
などを繰り返すトータルモード

モード2 強いたたきと弱いたたきを繰り返すモード

モード3 さすり動作を繰り返すモード

モード4 たたきながらささる動作を繰り返すモード

モード5 たたきながらもむ動作を繰り返すモード



短押しする度に  
強さレベルがダウンする

短押しする度に  
強さレベルがアップする

### ④左側の[+]ボタンを長押しして本体パッドのレベルを調整する。

電源をONした後に[+]ボタンを長押しする。  
この時に、「本体パッドレベルを調整します」とアナウンスがあります。  
その後に、[+]ボタンを短押しすると、強さのレベルが段階的にアップします。  
また、[-]ボタンを短押しすると強さのレベルがダウンします。(レベルのアナウンスあり)。



長押し

### ⑤左側の[-]ボタンを長押ししてゲルパッドのレベルを調整する。

電源をONした後に[-]ボタンを長押しする。  
この時に、「ゲルパッドレベルを調整します」とアナウンスがあります。  
その後に、[+]ボタンを短押しすると、強さのレベルがアップします。  
また、[-]ボタンを短押しすると強さのレベルがダウンする(レベルのアナウンスあり)。



長押し

### ⑥左側の+/-ボタンでパッドのレベルを設定する。

レベルは20段階から選択が可能です。  
初めてご使用になる場合は、必ず弱めのレベルから開始してください。  
慣れてきたら、徐々にレベルを上げてください。

[-]ボタン

短く押すとボタンが1段階ずつ下がります。



[+]ボタン

短く押すとボタンが1段階ずつ上がります。

**⑦右側の[ヒーター]ボタンでヒーターレベルを調整する。**


[ヒーター]ボタンを押すごとにレベルが変わります。

ヒーターレベル1(低温)→ヒーターレベル2(中温)→ヒーターオフ

※電源がオンになるとデフォルト設定でヒーターレベル1の状態(デフォルト設定)になっています。


**⑧右側の[⏻]ボタンで音声モードを設定する。**

[⏻]ボタンを短押しして日本語→英語→音声なしと切り替えできます。

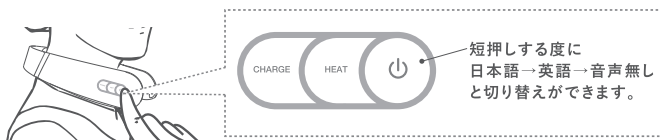

**⑨お好みで専用ゲルパッドを使う。**

- ゲルパッド接続ケーブルをゲルパッド接続口につないでください。
- 専用ゲルパッドとゲルパッド接続ケーブルを接続してください。
- 専用ゲルパッドの専用保護シートをはがして体(肩や腰)に貼り付けてください。

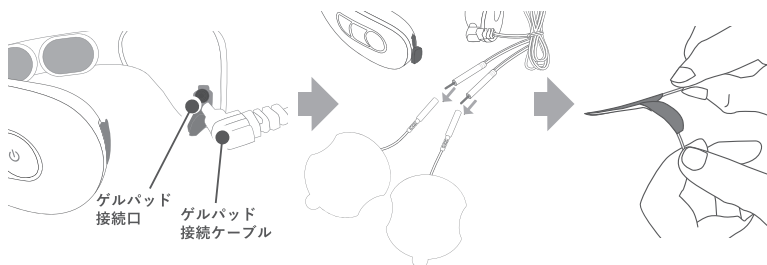

心臓の近く、胸部付近、頭部、口や陰部、皮膚疾患部、刺青（タトゥ）  
などには使用しない  
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

**⑩使用后、電源がオフになっていることを確認して身体から取りはずす。**

途中で使用を止める場合は、[⏻]ボタンを約1秒長押しして、  
電源をオフにしてください。




異常を感じた際は、電源・音声切替ボタンを長押しして  
全面停止するか、あるいは本体を首から外す。

## お手入れについて

※本体カバーは取りはずしできません。

- ① 本体、操作パネルの汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、やわらかい布でからぶきしてください。ただし、本体内部に水などが入らないようにご注意ください。
- ③ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。

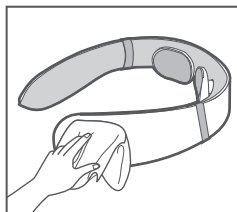

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

### 保管について


本体、付属品などは次回の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ない場所に保管してください。  
また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。

### 本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。

### リモコンの電池交換について (リチウムコイン電池CR2032)

リモコンの電池を交換する場合は、工具 (マイナスドライバー) の先で電池の蓋の凹みの箇所には先を差し込んで静かにこじってください。+ (プラス) 側が上にくるようにコインの電池を挿入して上蓋を閉じてください。コイン電池を取ると基板に (B-) の印字があり、(B) はバッテリー (-) は極性を表しています。

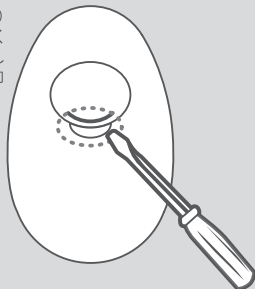

- ・電池や製品を幼児の手の届くところにおかない。誤飲の可能性があります。
- ・万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談して下さい。真夜中など近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

「毒性に関するお問い合わせ先」  
(財)日本中毒情報センター中毒110番  
(大阪)072-727-2499 (24時間対応)

※しばらく使用しない時は、リモコンからリチウムコイン電池をはずしてください。

## 本製品を破棄するとき

条例に従って破棄・またはリサイクルしてください

### リチウムイオン電池のリサイクルについて

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。この充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーの破棄の際は、リサイクルにご協力ください。リサイクルに関しては、当社のお客様相談窓口にお問い合わせください。

※バッテリーの破棄はお住いの自治体の規則に従ってください。



Li-ion20

### リチウムイオン電池の取り外し方

用意するもの




マイナスドライバー



はさみ

- ①リチウムイオン電池は  
ジェルパッド接続口(左側)に  
取付けられています。


リチウム  
イオン電池

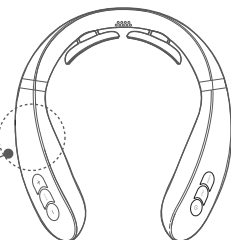

リチウム  
イオン電池

はさみ

リチウム  
イオン電池

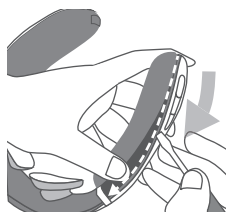

- ②点線方向にそって  
裏カバーを開けます。

- ④ハサミでリチウムイオン電池の  
接続コードを切り取り除いて下さい。

を図のよう  
にす。






マイナス  
ドライバー

# 仕様

販売名	エイミー ネックマッサージャー AIM-023
医療機器認証番号	303AGBZX00058000
一般的名称	家庭用低周波治療器
専用USBケーブル	USBタイプC
使用電源	DC5.0V 1A
使用電池	DC3.7V (リチウムイオン電池800mA)
充電時間	約180分
使用回数	満充電後 ①強度レベル20 ヒーター高温 約5回(約75分間) ②強度レベル20 ヒーター低温 約6回(約90分間) ③強度レベル20 ヒーターオフ 約25回(約375分間)
定格出力電圧	約42V
最大出力電流	約4mA
基本周波数	約10-140Hz
最大パルス幅	約120us
定格時間	約15分
消費電力	約5W
外形寸法	本体：約幅144×奥行46×高さ176mm パッド：約幅50×60×2mm パッド接続コード：長さ約1.5m USBコード：長さ約1.2m
質量	本体：約175g パッド：約9g USBコード：約27g パッド接続コード：約17g
材質	ABS・シリコン
原産国	中国

## ■表示されているシンボルについて

	直流マーク
	リチウムイオン充電電池のリサイクルマーク。
	電気機器の感電に対する保護の分類。 感電に対する保護を安全特定低電圧 (SELV) 「7」の電源に依存し、安全特定低電圧 (SELV) より高い電圧が発生しない機器。

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源が入らない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長押ししていない。</li> <li>・電池残量がない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・約 1 秒長押ししてください。</li> <li>・充電をしてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気刺激が強い</li> <li>・ビリビリする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲルパッドが消耗している。</li> <li>・強さのレベルが強い。</li> <li>・専用のゲルパッドを使用していない。</li> <li>・動作中にゲルパッドが身体から剥がれた（密着していない）。</li> <li>・連続して 30 分を超えて使用している。</li> <li>・肌が乾燥している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲルパッドを交換してください。</li> <li>・強さ選択ボタンの「-」を押し、強さを少しずつ下げてください。</li> <li>・付属の専用ゲルパッドまたは専用の交換用ゲルパッドを使用してください。</li> <li>・ゲルパッドが身体に密着するようにきちんと貼り付けてください。</li> <li>・連続で使用せず、1 日 2 回の使用を目的に、時間をおいて使用してください。</li> <li>・皮膚を水で湿らせて、水分をしっかりと拭きとってから再度使用してください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲルパッドが本体から剥がれてしまう</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲルパッドと伝導部の間に空気が入っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体の伝導部にゲルパッドを貼り付けた後は、指を押し付けて、空気を抜いてから使用してください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電ができない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・完全放電している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修理を依頼してください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気刺激が弱い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲルパッドが消耗している。</li> <li>・強さのレベルが弱い。</li> <li>・専用のゲルパッドを使用していない。</li> <li>・動作中にゲルパッドが身体から剥がれた（密着していない）。</li> <li>・皮膚が極度に乾燥している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲルパッドを交換してください。</li> <li>・強さ選択ボタンの「+」を押し、強さを少しずつ上げてください。</li> <li>・付属の専用ゲルパッドまたは専用の交換用ゲルパッドを使用してください。</li> <li>・ゲルパッドが身体に密着するようにきちんと貼り付けてください。</li> <li>・皮膚を水で湿らせて、水分をしっかりと拭きとってから再度使用してください。</li> </ul>

## 使用目的 / 効能または効果

---

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防およびマッサージ効果。一般家庭で使用すること。

### ご注意

効能や効果は個人により差があります。

## 保証とアフターサービス

※必ずお読みください。

### (1) 保証書（裏表紙）

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

### (2) 保証期間中に修理を依頼される場合保証書の記載内容に従って修理いたします。

### (3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### (4) 補修用部品の最低保有期間

当社はこの「エイミー ネットマッサージャー」の<sup>※</sup>補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

### (5) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

## ■お客様相談窓口

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ナビダイヤル（携帯OK） 全国どこからでも市内通話料でOK

 0570-081-634

【受付時間】 祝日を除く月～金 10:00～17:00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。その場合、下記電話番号へお掛けください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL: 03-3279-1511・1512 FAX: 03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋 1-6-5



# 保証書

持込修理

エイミー ネットマッサージャー AIM-023

ご購入日

・

保証期間:お買い上げ日より1年間

## お客様

お名前

TEL

ご住所

〒

## 販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1.取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2.本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。 (4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障  
(2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。 または損傷。  
(3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。 (5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。

4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製造販売元:株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 [www.tsukamoto-aim.co.jp](http://www.tsukamoto-aim.co.jp)

